

PRUEBA INDIVIDUAL REALY TECH ANTÍGENO DE SALIVA COVID-19



REALY TECH

¡Sin molestias!

**Sensibilidad:
93,94%
Especificidad:
99%**



**RÁPIDOS
RESULTADOS
EN 10 MIN**

SSA EN TRÁMITE
REGISTRO COFEPRIS EN TRÁMITE

PRUEBA INDIVIDUAL REALY TECH ANTÍGENO DE SALIVA COVID-19



Industrial Supplies de México, presenta:
LA PRUEBA INDIVIDUAL MÁS VENDIDA EN EL MUNDO POR SU
ALTO NIVEL DE EXACTITUD del laboratorio Realy Tech.

Caja con test individual / Un sólo test

La saliva tiene un papel fundamental en la transmisión de COVID-19 en la población, de hecho, estudios actuales han demostrado que la saliva podría ser una alternativa validada no invasiva para el diagnóstico y el monitoreo de la carga viral de SARS-CoV-2, proporcionando una plataforma rentable y conveniente. En conclusión, es fundamental que los centros de investigación a nivel mundial consideren los beneficios de este fluido, así como la posibilidad de identificar marcadores que permitan realizar el diagnóstico de manera segura y poco invasiva.

¡DETECTE OPORTUNAMENTE BROTES Y CONTAGIOS, GARANTICE LA SALUD DE SUS TRABAJADORES!

Prueba de diagnóstico in vitro para la detección cualitativa de antígenos del coronavirus SARS-CoV-2 presentes en la saliva humana, método inmunocromatográfico rápido, se puede evaluar después de 10 minutos.

Sumemos esfuerzos, La Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países que intensifiquen sus programas de pruebas como la mejor manera de frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

"Tenemos un mensaje simple para todos los países: ***"prueba, prueba, prueba"***, ha dicho Tedros en una conferencia de prensa en Ginebra. Sin pruebas, ***"los casos no podrían aislarse y la cadena de infección no se rompería"***



Incluye

1

- Dispositivo de prueba
- Bolsa para recolección
- Tubo de recolección con tapa
- Pipeta de plástico
- Instrucciones
- Buffer

Beneficios


- El muestreo de saliva rápido y fácil reduce el tiempo necesario para realizar la prueba, obtenga el resultado en 10 minutos.
- Adecuada para niños
- Sensibilidad: 93,94%
- Auto muestreo fácil que reduce el riesgo de transmisión de virus al realizar la prueba.

Resultados en:



Sensibilidad: 93,94%
Especificidad: 99%

Procedimiento de preparación y prueba

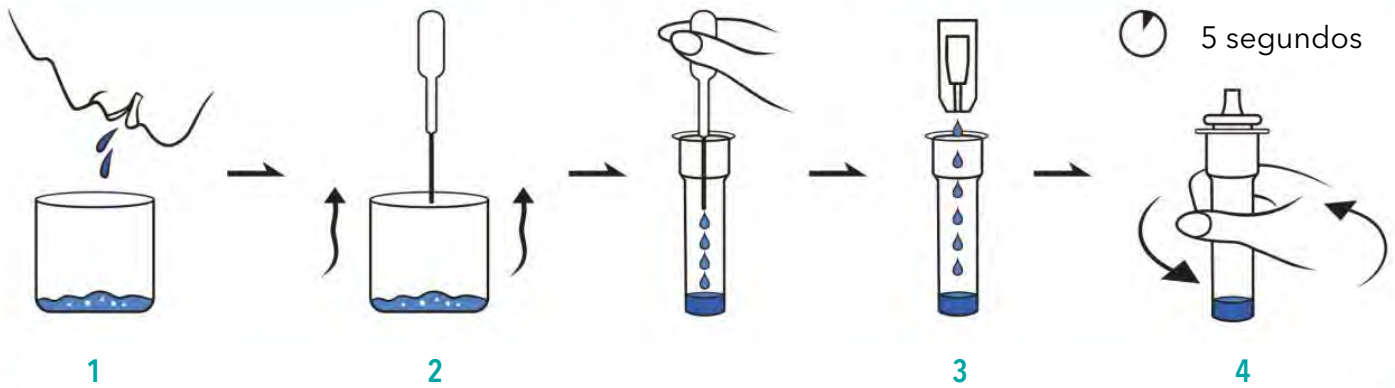


Deje que el dispositivo de prueba, la muestra y el tampón de extracción se equilibren a temperatura ambiente (15-30 ° C) antes de realizar la prueba. No coloque nada en la boca, incluidos alimentos, bebidas, goma de mascar, tabaco, agua y productos de enjuague bucal durante al menos 10 minutos antes de recolectar la muestra de líquido oral.

1. Escupir suficiente saliva en la taza / bolsa recolectora de saliva.
2. Saque un tubo de extracción y una botella de tampón de extracción, retire la tapa de la botella de tampón de extracción, agregue todo el tampón de extracción en el tubo de extracción.
3. Extraiga suficiente saliva del vaso con un gotero, asegúrese de que el nivel del líquido no exceda el túnel entre la bolsa de aire inferior y el tubo de plástico, transfiera toda la saliva del tubo de plástico al tubo de extracción.
4. Saque una boquilla y ciérrela en el tubo de extracción, agite suavemente el tubo de extracción verticalmente durante unos 5 segundos para permitir que la saliva se mezcle bien con el tampón de extracción. Doble la taza / bolsa usada por la mitad y deséchela en la bolsa de plástico como desperdicio médico de acuerdo con las regulaciones locales.
5. Saque el dispositivo de prueba de la bolsa de aluminio sellada y utilícelo lo antes posible. Se obtendrán mejores resultados si el ensayo se realiza inmediatamente después de abrir la bolsa de aluminio. Coloque el dispositivo de prueba sobre una superficie limpia y plana. Transfiera 3 gotas de muestra en el pocillo de muestra del dispositivo de prueba verticalmente, inicie el temporizador.
6. Lee el resultado a los 10 ~ 20 minutos. No interprete el resultado después de 20 minutos.



Interpretación de resultados

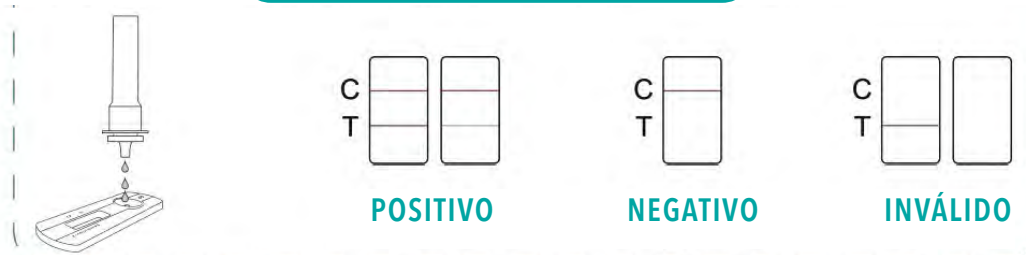

POSITIVO: Aparecen dos líneas rojas. Aparece una línea roja en la región de control (C) y una línea roja en la región de prueba (T). El tono de color puede variar, pero debe considerarse positivo siempre que haya incluso una línea tenue.

NEGATIVO: Solo aparece una línea roja en la región de control (C) y ninguna línea en la región de prueba (T).

El resultado negativo indica que no hay partículas del nuevo coronavirus en la muestra o que el número de partículas virales está por debajo del rango detectable.

NO VÁLIDO: No aparece ninguna línea roja en la región de control (C). La prueba no es válida incluso si hay una línea en la región de prueba (T). Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables de la falla de la línea de control. Revise el procedimiento de prueba y repita la prueba con un nuevo dispositivo de prueba.



Más de **1,000,000**
de pruebas entregadas

Algunos de nuestros clientes satisfechos:



**90% de nuestros clientes
cotizan en la bolsa de valores**

PRUEBA INDIVIDUAL REALY TECH ANTÍGENO DE SALIVA COVID-19



10

pruebas

\$4,950 + IVA

Inversión Real
\$5,900 + IVA

20

pruebas

\$7,950 + IVA

Inversión Real
\$11,800 + IVA

50

pruebas

\$16,900 + IVA

Inversión Real
\$29,500 + IVA

1 a 9 pruebas individuales: \$590 pesos + IVA c/u



**En la compra de cada paquete se incluye seminario online en vivo:
PREVENCIÓN Y VIGILANCIA DE BROTES COVID-19 EN LAS EMPRESAS**

Se entrega formato DC-3, válido ante cualquier auditoria por parte de la Secretaria del Trabajo y autoridades Sanitarias, somos la única empresa en el país que ofrece este beneficio.

REGISTRO COFEPRIS EN TRÁMITE
SSA EN TRÁMITE



55 8606 6816

33 3121 1350

contacto@industrialsupplies.com.mx

Di no a la piratería

www.industrialsupplies.com.mx

No tenemos intermediarios no se deje sorprender

PRUEBA INDIVIDUAL REALY TECH ANTÍGENO DE SALIVA COVID-19

Número de cajas

Nombre: _____
Teléfono: _____
E-mail: _____
Dirección de envío: _____

Autorizado por:

Nombre: _____
E-mail: _____ Teléfono: _____
Puesto: _____

DATOS DE FACTURACIÓN

Razón Social : _____ RFC: _____
Dirección: _____ Colonia: _____ C.P.: _____
Ciudad: _____ Estado _____

FORMA DE PAGO

☐ Transferencia Electrónica ☐ Déposito Bancario

MÉTODO DE PAGO:

Fecha de pago: _____ Uso del CFDI: _____

☐ Pago en Parcialidades ☐ Pago en una sola exhibición

POLÍTICA DE ENTREGA

ENTREGA INMEDIATA después de validar su pago

Prueba de alta demanda debido a su efectividad, periodo de entrega sujeto a cambios sin previo aviso.

DATOS DEPARTAMENTO DE PAGOS:

Nombre: _____
Puesto: _____
E-mail: _____
Teléfono: _____

Favor de enviar este formato por e-mail a:
contacto@industrialsupplies.com.mx

NO INCLUYE GASTOS DE ENVÍO

Forma de Pago

Cheque a nombre:

ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MEXICO S.C.

BBVA cta 0114051173

Transferencia Electrónica

012 320 00114051173 1

Pago con Tarjeta:



No se aceptan cancelaciones

En el presente documento manifiesto que cuento con la capacidad legal suficiente para la compra de este producto. Así mismo, manifiesto mi libre y total consentimiento, para comprometerme y obligarme frente a ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MÉXICO S.C. a pagar la cantidad manifestada en la sección correspondiente al precio total de las piezas que he adquirido aquí detalladas; en las formas y términos descritos en este documento.

Manifiesto que el presente documento comprende el total y único acuerdo de precio y objeto de la compra-venta celebrada con ENTRENAMIENTO INDUSTRIAL DE MÉXICO S.C., la cual ha tenido por objeto la adquisición de dicho producto.